



PROCOLO

21

Manejo de muestras respiratorias (no COVID-19) en cámara de bioseguridad. Se manejarán como si lo fueran.

Todo el proceso se debe hacer en cámara de flujo laminar

1. **Iniciar la cámara** como está establecido.
2. **Lavarse las manos con agua y jabón.**
3. **Colocarse:** doble guante, tapabocas N95 y bata antifluidos (sobre la bata de laboratorio que se usa de rutina).
4. **Dentro de la cámara,** empezar el procesamiento completo de la muestra.
5. **No hablar** durante el procesamiento de la muestra.
6. **Una vez terminado el procesamiento,** descartar los guantes, bata antifluidos en bolsa roja como se indica en el protocolo 20.
7. **No se toque los ojos, la nariz ni la boca.**

Nota: para el manejo del tapabocas N95, ver instrucciones del manual de bioseguridad de la OMS.

